

Guide pratique pour les techniques de pansement innovantes



Moins de jours avec des plaies. Le soin des plaies orienté vers le patient

Ce guide pratique a été développé par des experts en soins des plaies, qui prennent en charge des plaies difficiles à traiter dans leur quotidien professionnel.

L'application correcte des pansements fait partie de la prise en charge des plaies. L'objectif principal est de favoriser chaque jour la cicatrisation de la plaie en créant un milieu humide. L'approche holistique des soins dispensés aux patients joue un rôle de premier plan dans le traitement des plaies chroniques. En complément des facteurs qui influencent la cicatrisation de la plaie, l'analyse des besoins spécifiques du patient représente une étape importante, avant de s'occuper de la plaie à proprement parler.¹

Le patient, avec ses besoins et ses peurs, occupe la première place dans le soin des plaies.

En plus de voir la cicatrisation retardée, les personnes présentant des plaies chroniques souffrent souvent de manifestations concomitantes gênantes, telles que les odeurs, macérations, fuites, douleurs, infections, voire aussi l'isolement social dans les cas les plus graves, qui exercent un fort impact sur leur vie quotidienne.

Malgré la large gamme de pansements disponibles et la formation experte du personnel soignant, certaines plaies représentent un véritable défi en raison de leur localisation lors de la pose d'un pansement.²



Conseils et astuces utiles pour le soin des plaies

Avec ce petit guide pratique, nous espérons pouvoir vous donner quelques conseils pratiques, afin de vous aider dans le soin quotidien des plaies, et de ce fait, améliorer la qualité de vie des patients atteints de plaies chroniques. Chaque jour compte dans le soin des plaies.

Des règles similaires s'appliquent à toutes les articulations pour la pose d'un pansement. Les exemples représentés au talon ou au coude peuvent aussi être transposés à d'autres articulations.

Les découpes montrées pour les plaies modérément à fortement exsudatives sont utilisables pour les pansements mousse, actifs et non actifs.

En cas de plaies à forte colonisation bactérienne ou plaies localement infectées, il est recommandé d'utiliser le pansement mousse à l'argent Biatain® Ag. En présence de douleurs liées à la lésion tissulaire, le pansement mousse Biatain® Ibu à l'ibuprofène peut vous aider dans la prise en charge de la plaie.

Hygiène

La recommandation principale applicable à tous les pansements est le principe « Non Touch » (Bundesgesundheitsblatt 1985, Bulletin de l'Office fédéral de la Santé publique). Cela signifie que tous les instruments et matériaux qui sont en contact direct avec la plaie, doivent être stériles. Un nettoyage hygiénique des mains, non seulement avant, mais aussi après le changement de pansement, est absolument indiqué.

Références bibliographiques

- 1 Sibbald, R.G. et al, Preparing the Wound Bed 2003: Focus in infection and inflammation, Ostomy/Wound Management, November 2003, Vol. 49 (11): 24-51.
- 2 Fletcher, J., A practical approach to dressing wounds in difficult positions. British Journal of Nursing, 1999, Vol. 8 (12): 779-786.

Développé en collaboration avec

Pia Carlsen, RN, DK/Jacqui Fletcher, Principal Lecturer, MSc BSc (Hons) PG Dip (ED) RN ILT, GB/Maria Mousley, AHP, Consultant Podiatrist, GB/Henri Post, M.A., Nurse Practitioner, RN, NL/Adrienne Taylor, MSc, RN, RM, DN, GB/Wilma Verbeek-Gijsbers, RN, NL/Robert Zimmer, Fachkrankenschwester Onkologie, DE

Aperçu des recommandations principales pour des soins de plaies appropriés.



Vérifiez toujours l'origine de la plaie.



Suivez les directives locales en matière de contrôle des infections, afin d'éviter les infections croisées.



N'utilisez que des ciseaux affûtés stériles pour couper le pansement.



Il est possible d'utiliser une protection cutanée pour protéger la peau environnante.



La plupart du temps, les fabricants recommandent d'appliquer le pansement en position centrale sur la plaie. Veuillez toutefois prendre en considération le sens d'écoulement de l'exsudat.



Après une découpe dans un pansement, les éventuels angles doivent être arrondis pour que le pansement adhère mieux.



Pour les pansements autoadhésifs, le protecteur doit être retiré qu'après avoir coupé le pansement, afin de faciliter la découpe.



Appliquez les pansements sans les étirer, sous peine de provoquer des phlyctènes.




Bien que certains pansements possèdent des rembourrages pour éviter les frottements, il convient de prendre des mesures supplémentaires pour soulager la pression.




Pour plus d'informations, scannez le code QR.


Il vous mènera à notre **Parcours vers la cicatrisation** – En 5 étapes vers la guérison des plaies.

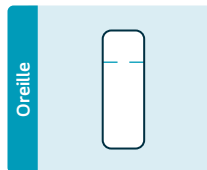

Découpez une bande étroite de pansement Comfeel® Plus Transparent en fonction de la taille de l'oreille. Faites une incision dans cette bande étroite uniquement dans le tiers supérieur. Retirez doucement le film protecteur. Appliquez le pansement derrière l'oreille « de haut en bas », depuis le bord supérieur de l'oreille en direction du lobe.

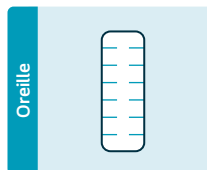

Découpez une bande de pansement Comfeel® Plus Transparent en fonction de la taille de l'oreille. Faites plusieurs incisions dans cette bande sur les deux côtés. Retirez doucement le film protecteur. Appliquez le pansement derrière l'oreille selon la plaie à traiter. Cette technique de pansement peut aussi être utilisée dans la région nasale.

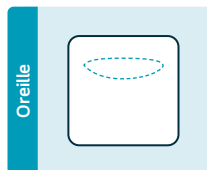

Découpez une bande étroite de pansement mousse Biatain® non adhésif ou Biatain® Silicone Non-Border en fonction de la taille de l'oreille. Faites une incision dans cette bande dans le sens de la longueur, sans pour autant couper les extrémités. Choisissez ensuite une fixation appropriée.

Biatain® Silicone Multiforme

Grâce à sa grande flexibilité, le pansement Biatain® Silicone Multiforme peut être appliqué sur différentes parties du corps, notamment sur les zones soumises à de forts mouvements. Ci-après nous illustrons quelques exemples, parmi de nombreuses autres applications possibles.



Faites attention lors de l'utilisation du pansement dans la région gouttière sudorale et, le cas échéant, à l'augmentation de transpiration.




Le pansement doit être appliqué sur l'épaule en position décontractée et naturelle.



Le pansement devrait être appliqué avec une flexion du bras de 90°.



Le pansement devrait être appliqué avec une flexion de 90°.

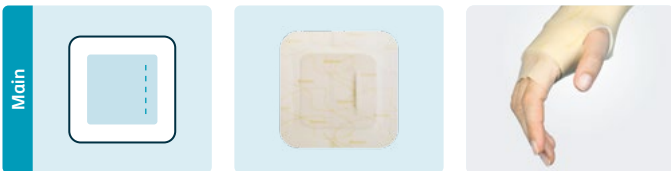


Découpez latéralement dans le coussin d'un pansement mousse Biatain® adhésif/Biatain® Silicone Lite/Biatain® Silicone Ag une fente dans le sens de la longueur, par exemple pour les bords de la main. Appliquez le pansement en faisant passer au choix le petit doigt ou le pouce dans la fente et appuyez doucement sur les bords adhésifs.



Après avoir retiré le film protecteur, posez un grand pansement Comfeel® Plus Flexible (par ex. 20 × 20 cm) sur une surface stérile (côté adhésif vers le haut) devant le patient. Placez la main à soigner au centre du pansement, bien à plat, les doigts légèrement écartés en exerçant une légère pression. Prenez un deuxième pansement hydrocolloïde de la même taille, retirez le film protecteur et appliquez le pansement également au centre sur la main – avec un décalage de 45°. Rabattez maintenant les bords libres pour le fixer. L'octogone ainsi obtenu protège la main des influences extérieures et permet au patient de prendre des objets. Cette technique de pansement est indiquée pour les brûlures de 1er et 2ème degré.



Découpez une bande étroite ou un petit carré de pansement mousse Biatain® non adhésif ou Biatain® Silicone Non-Border en fonction de la taille de la main/du doigt, ou utilisez un pansement particulièrement petit, par exemple 5 × 7 cm, non adhésif. Faites maintenant une incision dans cette bande de 3 cm environ dans le sens de la longueur et appliquez le pansement en faisant passer un doigt par la fente. **Choisissez ensuite une fixation appropriée.**

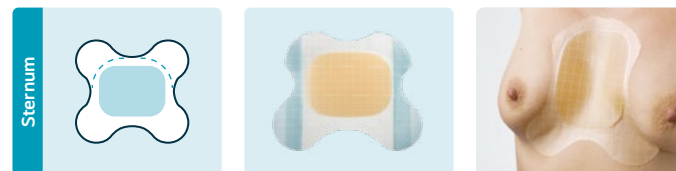

Découpez un pansement Comfeel® Plus Contourné selon la taille de la poitrine. La forme ovale du pansement permet d'utiliser le pansement hydrocolloïde au choix en hauteur ou dans le sens transversal.



Si une plaie se trouve à proximité d'une stomie, il faut déterminer si la plaque de base doit être posée sous ou sur le pansement/ pansement mousse Biatain®.




En cas de plaies dans la région sacrale modérément à fortement exsudatives, il faut utiliser par exemple un pansement mousse Biatain® Silicone Sacrum / Biatain® Sacrum adhésif. Selon les besoins, les deux types d'adhésion sont disponibles dans une petite et une grande taille. Pour les petites plaies dans cette région, il est possible d'utiliser également de Biatain® Silicone Sacrum petit. Les deux pansements sacrum peuvent être appliqués dans les deux sens.



Grâce à leur grande flexibilité, il est possible d'utiliser les pansements Biatain® Silicone Sacrum petit et grand à divers endroits du corps tels que par ex. sur le tendon d'Achille ou sur le mollet.



Dans ce cas, l'utilisation d'un pansement mousse Biatain® Silicone Talon est recommandée. En alternative, une variante adhésive est également disponible.

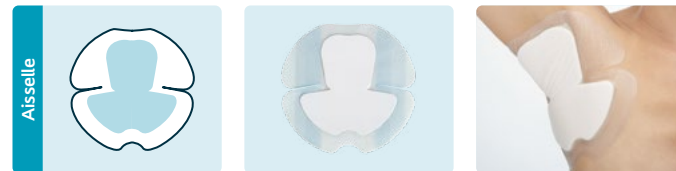

Biatain® Silicone Talon convient également pour soigner une plaie à l'aisselle. Avant l'application, faites cependant attention à l'endroit exact d'où sort l'exsudat et au « sens d'écoulement » de l'exsudat.



Utilisez deux pansements mousse Biatain® Silicone de même taille, par exemple pour les plaies importantes à l'avant-bras. Fixez le premier pansement mousse adhésif sur trois côtés, laissez le feuillet protecteur du côté à prolonger, rabattre le bord adhésif et presser par exemple à l'aide de ciseaux stériles. Fixez le deuxième pansement « en miroir », les deux coussins de mousse se touchant, tirez les deux feuillets protecteurs et collez enfin les deux bords adhésifs rabattus l'un avec l'autre. Les bords adhésifs reliés peuvent simplement être rabattus.



Découpez un petit triangle dans un pansement mousse Biatain® non adhésif ou Biatain® Silicone Non-Border. Découpez le côté du pansement et poussez le entre les orteils, de sorte que la plaie puisse être entourée de pansement mousse.

Choisissez ensuite une fixation appropriée.



Découpez une « croix » de taille appropriée dans un pansement mousse Biatain® non adhésif ou Biatain® Silicone Non-Border. Appliquez le pansement ainsi découpé, de sorte que l'orteil soit suffisamment entouré. Choisissez ensuite une fixation appropriée.



Découpez une « croix » de taille appropriée dans un pansement mousse Biatain® non adhésif ou Biatain® Silicone Non-Border. Appliquez le pansement ainsi découpé entre les orteils de sorte, qu'une extrémité de la croix soit ajustée sur la plante du pied et le côté supérieur du pied. Les deux autres extrémités sont jointes l'une à l'autre, rembourrant ainsi l'espace entre les orteils. Choisissez ensuite une fixation appropriée.



Découpez une sorte de « sablier » de taille appropriée dans un pansement mousse Biatain® non adhésif ou Biatain® Silicone Non-Border. Appliquez le pansement ainsi découpé entre les orteils, de sorte que chaque extrémité du sablier soit ajustée sur la plante du pied et le côté supérieur du pied. Choisissez ensuite une fixation appropriée.



Découpez deux triangles de taille appropriée sur les côtés d'un pansement mousse Biatain® non adhésif ou Biatain® Silicone Non-Border. Appliquez la partie plus large au niveau du tendon d'achille et replier les parties latérales inférieures autour du talon autour. Choisissez ensuite une fixation appropriée.

Note importante

En raison du dépôt super absorbant supplémentaire, Biatain® Silicone ne peut pas être découpé, cependant, il est possible de découper Biatain® Silicone Non-Border, Biatain® Silicone Lite et Biatain® Silicone Ag.

Conseils et astuces pour la fixation de Biatain® Superabsorber

Biatain®
Superabsorber
ne peut pas être
découpé

Dans certaines zones anatomiques, le traitement des plaies peut s'avérer particulièrement difficile. Les cas suivants illustrent la fixation sur quelques parties du corps sélectionnées par des professionnels et fournissent des indications utiles.

Choisissez l'option de fixation appropriée en fonction du confort de votre patient et des matériaux de fixation disponibles. Veillez à choisir la taille du produit qui correspond aux besoins de votre patient et à la plaie que vous devez traiter.

Pied et jambe



Pour les plaies au talon (ici 12 × 12 cm, par ex. ulcères du pied diabétique) ou à la jambe (ici 20 × 25 cm, par ex. ulcère cruris venosum)



Fixez le pansement avec, par ex. une bande de gaze. Enveloppez le plus possible en spirales sans faire de plis. Appliquez le pansement fermement, mais sans trop le serrer, et fixez-le pour finir. Veillez à ce que le pied forme un angle droit sur toute sa longueur afin d'éviter toute mauvaise position.



Biatain® Superabsorber est également indiqué pour une utilisation sous un pansement compressif. Si votre patient a besoin d'une compression, vous pouvez appliquer un bandage de compression adéquat par-dessus le Superabsorbant et la gaze.

Bas du dos



Posez le pansement (15 × 15 cm, p. ex. escarres) sur la plaie dans le bas du dos et fixez-le, p. ex. avec un pansement en film plastique. Collez des bandes de film plastique découpées en forme de fenêtre sur les bords du pansement pour qu'il puisse „respirer“. Assurez-vous qu'en cas d'incontinence urinaire ou fécale, le pansement soit collé de manière étanche aux endroits critiques des fesses.

Cou



Choisissez la bonne taille pour la plaie (ici 12 × 22 cm, par ex. cicatrisation secondaire après un athérome infecté). Fixer le pansement avec, par exemple, un non-tissé adhésif respirant que vous aurez découpé à l'avance. Conseil : épinglez au préalable les cheveux fins sur le bas de la tête/nuque. N'étirez pas la fixation, car cela pourrait entraîner la formation de cloques sur la peau.

Poitrine



Pour les plaies du haut du corps, appliquez le pansement approprié (ici 25 × 45 cm, par ex. cancer du sein) et fixez-le par exemple avec du non-tissé adhésif que vous aurez découpé au préalable. N'étirez pas la fixation, car cela pourrait entraîner la formation de cloques. de la peau peut se produire. Évitez si possible la zone sous les aisselles lors de la fixation.



Une restauration adaptée à chaque défi : Vous trouverez ici des conseils utiles pour la fixation

Explication des symboles

	Léger		Très abondant		Résistant à l'eau
	Léger - moyen		Effet antibactérien		Fixation nécessaire
	Léger - abondant		Découpable		Pansement secondaire
	Moyen - abondant		Non découpable		

Pansement mousse



Biatain® Silicone Non-Border, avec adhésif en silicone



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
390201	5 × 7,5	10	7766826	35.05.03.01.1
390211	7,5 × 7,5	10	7766827	35.05.03.02.1
390221	10 × 10	10	7766828	35.05.03.03.1
390231	12,5 × 12,5	10	7766829	35.05.03.03.1
390242	10 × 20	5	7766830	35.05.03.04.1
390252	15 × 15	5	7766831	35.05.03.04.1
390262	20 × 20	5	7766832	35.05.03.06.1

Biatain® Silicone Lite, avec bord adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334520	5 × 5	2,2 × 2,2	5	6444784	35.05.03.01.1
334530	5 × 12,5	2,2 × 9,7	5	6444790	35.05.03.02.1
334443	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	5535987	35.05.03.02.1
334453	10 × 10	6,5 × 6,5	10	5535970	35.05.03.03.1
334463	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	5535993	35.05.03.03.1

Biatain® Silicone, avec bord adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334343	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	10	4671582	35.05.04.02.1
334353	10 × 10	6,5 × 6,5	10	4684538	35.05.04.03.1
334000	10 × 20	5,5 × 15,5	5	6662860	35.05.04.04.1
334010	10 × 30	5,5 × 25,5	5	6662877	35.05.04.05.1
334080	14 × 19,5	7,5 × 12,1*	5	6662920	35.05.04.05.1
334363	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	10	4671599	35.05.04.03.1
334373	15 × 15	10,5 × 10,5	5	5776030	35.05.04.04.1
334383	17,5 × 17,5	13 × 13	5	5941894	35.05.04.05.1

Biatain® Silicone, avec bord adhésif, Sacrum/Talon



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334040	15 × 19	10,9 × 14**	5	6662883	35.05.04.10.1
334050	25 × 25	17 × 17,2**	5	6662908	35.05.04.10.1
334060	18 × 18	14 × 13,2***	5	6662914	35.05.04.05.1

Biatain® Adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334200	12,5 × 12,5	8 × 8	10	5397539	35.05.03.03.1
334230	18 × 18	13 × 13	5	5397545	35.05.03.05.1

Biatain® Sacrum/Talon Adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
334830	17 × 17	8 × 9**	5	5397551	35.05.03.10.1
334850	23 × 23	10 × 11**	5	5397568	35.05.03.10.1
334880	19 × 20	6 × 6***	5	5397574	35.05.03.11.1

*Multiforme **Sacrum ***Talon

Biatain® Non adhésif



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
361050	5 × 7	10	5395084	35.05.03.01.1
334100	10 × 10	10	5395090	35.05.03.03.1
334120	10 × 20	5	5395115	35.05.03.04.1
334130	15 × 15	5	5395109	35.05.03.04.1
334160	20 × 20	5	5395121	35.05.03.06.1

Pansement mousse avec ions argent



Biatain® Silicone Ag, avec bord adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
396363	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	5	5604493	35.06.04.21.1
396373	10 × 10	6,5 × 6,5	5	5604501	35.06.04.22.1
396383	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	5	5604518	35.06.04.23.1
396393	15 × 15	10,5 × 10,5	5	6203856	35.06.04.24.1
396403	17,5 × 17,5	13 × 13	5	6203833	35.06.04.24.1

Biatain® Ag Adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
396320	12,5 × 12,5	8 × 8	5	7450918	35.06.04.23.1

Biatain® Ag Non adhésif



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
351050	5 × 7	5	5397812	35.06.04.20.1
396220	10 × 10	5	7450893	35.06.04.22.1
396230	10 × 20	5	5397841	35.06.04.23.1
396250	15 × 15	5	7450901	35.06.04.24.1
396260	20 × 20	5	5397858	35.06.04.25.1

Pansement mousse avec Ibuprofène



Biatain® Ibu Softhold



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
341400	10 × 10	5	7450870	—
341420	10 × 20	5	7450887	—

Biatain® Ibu Non adhésif



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
341050	5 × 7	5	5397887	—
341100	10 × 10	5	5397893	—
341120	10 × 20	5	5397901	—
341150	15 × 15	5	5397918	—
341200	20 × 20	5	5397924	—

Comfeel® Plus



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
331100	10 × 10	10	1834718	35.05.02.03.1
331150	15 × 15	5	1834724	35.05.02.04.1
331200	20 × 20	5	1834747	35.05.02.06.1

Comfeel® Plus Contoured



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
332800	6 × 8	5	1834753	35.05.02.02.1
332830	9 × 11	5	1834776	35.05.02.03.1

Comfeel® Plus Transparent



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
335300	5 × 7	10	6823470	35.05.02.01.1
335330	10 × 10	10	6823493	35.05.02.03.1
335480	5 × 25	5	6823524	35.05.02.03.1
335360	9 × 14	10	6823487	35.05.02.03.1
335420	15 × 20	5	6823501	35.05.02.05.1
335471	5 × 15	5	6823518	35.05.02.02.1
335370	9 × 25	5	6823530	35.05.02.04.1

Biatain® Superabsorber Non adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
336000	7,5 × 7,5	5,5 × 5,5	10	1122367	35.05.05.02.1
336020	12 × 12	10 × 10	10	1122368	35.05.05.03.1
336040	12 × 22	10 × 20	10	1122369	35.05.05.04.1
336050	15 × 15	13,5 × 13,5	10	1122370	35.05.05.04.1
336070	20 × 25	18 × 23	10	1122371	35.05.05.05.1
336100	25 × 45	23 × 43	10	1122373	35.05.05.08.1

Biatain® Super Adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
046100	10 × 10	5 × 5	10	5394759	35.05.05.03.1
046250	12 × 20	6 × 14	10	5394788	35.05.05.04.1
046150	15 × 15	8 × 8	10	5394765	35.05.05.04.1
046200	20 × 20	11 × 11	10	5394771	35.05.05.05.1

Biatain® Super Non adhésif



Référence	Taille en cm	Partie absorbante en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
046300	10 × 10	5 × 5	10	5394794	35.05.05.03.1
046350	15 × 15	8 × 8	10	5394802	35.05.05.04.1

Alginate/Alginate avec ions argent

Biatain® Alginate



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
037053	5 × 5	10	7795531	35.05.06.01.1
037102	10 × 10	10	7795525	35.05.06.02.1
037152	15 × 15	10	7795526	35.05.06.04.1
037403	3 × 44 Mèche	5	7795527	35.05.06.08.1

Biatain® Alginate Ag



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
037551	5 × 5	10	7795532	35.06.06.20.1
037600	10 × 10	10	7795528	35.06.06.21.1
037650	15 × 15	10	7795529	35.06.06.23.1
037800	3 × 44 Mèche	10	7795530	35.06.06.26.1

Pansement en fibres gélifiantes

Biatain® Fiber



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
335010	5 × 5	10	7749047	35.05.07.01.1
335030	10 × 10	10	7749048	35.05.07.02.1
335060	15 × 15	10	7749049	35.05.07.04.1
335070	19 × 25	10	7749050	35.05.07.05.1
335080	2,5 × 46 Mèche	10	7749051	35.05.07.09.1

Interface en silicone

Biatain® Contact, interface en silicone



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
335601	5 × 7,5	5	7741250	35.05.08.01.1
335611	7,5 × 10	5	7741251	35.05.08.02.1
335621	10 × 18	5	7741252	35.05.08.03.1
335630	15 × 25	5	7741253	35.05.08.04.1
335640	18 × 30	5	7741254	35.05.08.05.1

Tissu pour le traitement des plis cutanés

InterDry®, avec un complexe d'argent



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
679180	25 × 366 Rouleau	1	7674316	—
679190	25 × 91	10	7674322	—

Solution de rinçage des plaies

Allrinse® Solution de rinçage des plaies



Référence	Contenu	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
220P4795	NOUVEAU Spray 500ml	1	1110080	99.12.04.00.1

Coloplast développe des produits et services destinés à faciliter la vie des personnes souffrant d'une altération physique intime. Travaillant en étroite collaboration avec les patients, nous développons des solutions qui répondent à leurs besoins médicaux spécifiques.

Coloplast développe et commercialise des produits pour le soin des stomies, la continence, le soin des plaies et l'urologie. Coloplast est une entreprise présente dans le monde entier, employant plus de 12.000 collaborateurs.

Coloplast AG, Euro-Business-Center, Blegistrasse 1, CH-6343 Rotkreuz
Tel. +41 41 79979-79, swissinfo@coloplast.com, PM-22018